



Färbeanleitung

Kurzanleitung für das Einfärben gedruckter Orthesen.

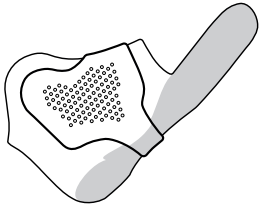


Vorbereiten

Oberfläche von Schmutz und Ölfilmen reinigen.

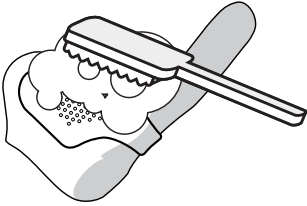


Topf mit Wasser, Färbemittel für Polyamid und Essigessenz füllen.
Mischung auf 60°C erhitzen, dabei gleichmäßig durchrühren.

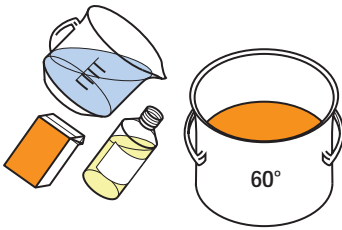

Färben

Orthese bis zur gewünschten Farbintensität im Färbebad umwälzen.

Orthese abspülen und Färberückstände entfernen.

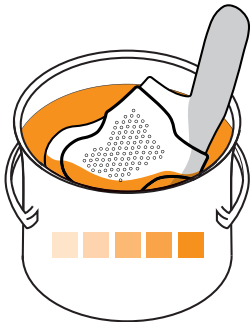

Versiegeln

Nach dem Färben ist die Oberfläche nach Bedarf mit Acryllack versiegelbar.

